

Sendoline®

PERFECT ENDO

S1 - SYSTÈME DE LIME UNIQUE À MOUVEMENT RÉCIPROQUE

Simple. Sûr. Complet.



Le système S1 permet un traitement canalaire avec un seul instrument mécanique. Le contre-angle S1 est doté d'un mécanisme d'engrenages intégrés uniques qui produisent le mouvement réciproque directement dans le contre-angle, pour un fonctionnement sans à-coups. Il n'y a pas de moteur externe : il suffit de brancher le contre-angle directement sur le fauteuil dentaire. S1 Plus Standard 25/06 est utilisé dans

la plupart des cas. Utiliser S1 Plus Small 15/06 pour le traitement des canaux étroits et resserrés et S1 Plus Large 40/04 pour les canaux larges. Le système S1 inclut également des pointes de papier stériles et des pointes de gutta-percha de taille adaptée pour les instruments S1 Plus Standard et S1 Plus Large. S1 – un système compact complet.



S1 Plus Start Up Set 2.0*

REF OP0007

Contient :

- 1 x contre-angle S1-E, avec S1 Apex Clip
- 6 x S1 Plus Treatment Pack**
- 1 x S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm
- 1 x S1 Plus Small 15/06 - 25 mm
- 1 x S1 Plus Large 40/04 - 25 mm

*En tout 30 instruments S1.



**S1 Plus Treatment Pack
(assez pour deux traitements)
2 x K-File 10 STERILE - 25 mm
2 x K-File 15 STERILE - 25 mm
2 x S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm

Sendoline®


PERFECT ENDO

INSTRUMENT S1 PLUS

Efficace. Flexible. Sûr.



L'instrument S1 Plus comporte le profil en S propre à Sendoline, avec doubles arêtes de coupe, ce qui le rend parfait pour le mouvement de réciprocité. Le pas de coupe progressif et la pointe mousse de l'instrument lui permettent de progresser dans le canal en toute facilité. S1 Plus Standard 25/06 est utilisé dans la plupart des cas. Utiliser S1 Plus Small 15/06 pour le traitement des canaux étroits et resserrés et S1 Plus Large 40/04 pour les canaux larges.

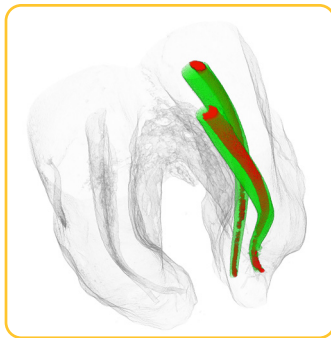

Micro-CT de S1 Plus Standard.
Indique la capacité de l'instrument (en vert) à négocier le canal (en rouge).

Effects of three reciprocating single-file NiTi-systems on root canal geometry - A micro-CT analysis

Haupt F et al.
Presented at ESE 2019.



S1 Plus Small 15/06



S1 Plus Standard 25/06



S1 Plus Large 40/04

Sûr

Le risque de fracture de l'instrument est minimisé.

Efficace

La double arête de coupe et le pas progressif de l'instrument le rendent souple et efficace.

Progression facile

La forme et la conception de la lime facilitent sa progression au cœur de canal.

Facilité d'utilisation

Les instruments sont fournis dans un blister stérile. Prêts à l'emploi.



RÉF.

Aperçu des produits

S1P01BS	S1 Plus Treatment Pack
S1P252506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm
S1P312506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 31 mm
S1P251506BS	S1 Plus Small 15/06 - 25 mm
S1P311506BS	S1 Plus Small 15/06 - 31 mm
S1P254004BS	S1 Plus Large 40/04 - 25 mm
S1P314004BS	S1 Plus Large 40/04 - 31 mm

