



S1 – RECIPROKERANDE ENFILSSYSTEM


Enkelt. Säkert. Komplett.



Sendoline®

S1-VINKELSTYCKET

Det smarta S1-vinkelstycket har en unik integrerad växellåda som skapar den reciprokerande rörelsen direkt i vinkelstycket vilket ger en mjuk arbetsgång. Du ansluter vinkelstycket direkt till din tandläkarunit utan behov av en extern motor.

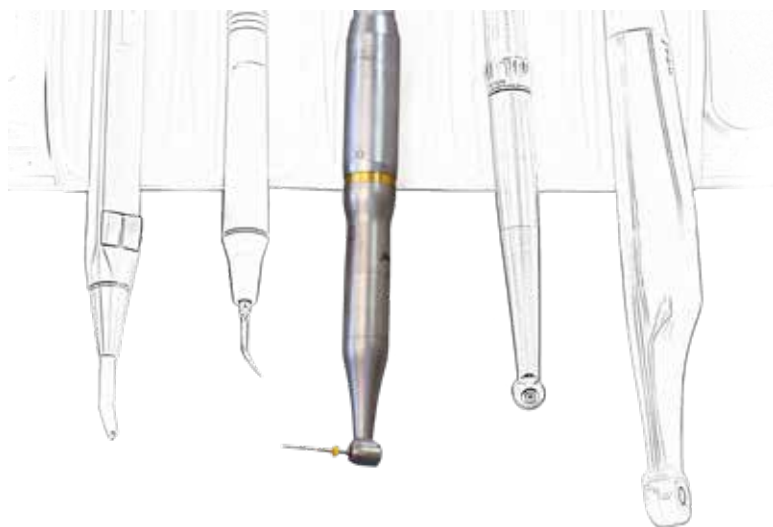

Enkelt

S1-vinkelstycket kopplas direkt till unitens motor. Du kontrollerar vinkelstycket genom att ge full fart med fotkontrollen.

Säkert

Den reciprokerande rörelsen ihop med filens elasticitet från nickeltitanlegeringen gör att risken för filfraktur minimeras.

Driftsäkert

Ingen extern motor behövs och det finns inga batterier att ladda.

Kostnadseffektiv hygienrutin

S1-vinkelstycket sköts och hanteras som dina övriga vinkelstycken. Du behöver ingen extra adapter i din smörj- och rengöringsmaskin.

Det smarta extra

Du har möjlighet att enkelt ansluta en apexlokalisator till vinkelstycket med medföljande S1 Apex Clip.

S5 Apex Locator

Använd en apexlokalisator för att fastställa rotkanalens längd. Du ansluter enkelt S1-vinkelstycket till en apexlokalisator med medföljande S1 Apex Clip.



S1 PLUS-FILEN



Med S1-systemet har du möjlighet att rotbehandla med endast en maskinell fil.

S1 Plus-filen har Sendolines unika S-profil med dubbla avverkande egggar vilket är optimalt för S1-systemets reciprokerande rörelse.

Filens förlängda vridningar och avrundade spets gör den flexibel med mycket god kanalföljsamhet.

Säker

Minimerad risk för filfraktur.

Effektiv

Filens skär och förlängda vridningar gör den flexibel och effektiv.


Följsam

Utformningen och designen gör den följsam i kanalen.

Enkel hantering

Filarna levereras sterilförpackade i blister. Färdiga att använda.


BEKRÄFTAD KANALFÖLJSAMHET OCH MATERIALHÅLLFASTHET

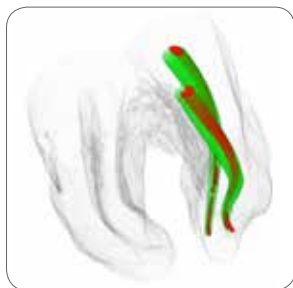

Micro-CT av S1 Plus Standard. Visar filens följsamhet (grön) i kanalen (röd).

Effects of three reciprocating single-file NiTi-systems on root canal geometry - A micro-CT analysis

Haupt F et al.
Presented at 19th Biennial ESE Congress

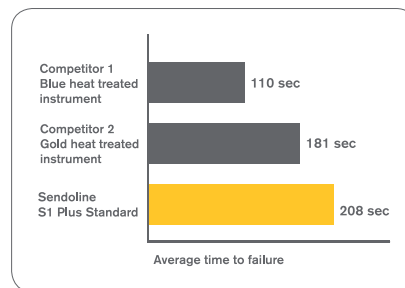

Motstånd mot materialutmattning.

Data on file.

KOMPLETT, KOMPAKT SYSTEM

S1-systemet ger dig möjlighet att göra dina rotbehandlingar med endast en maskinell fil. I de flesta fall används S1 Plus Standard 25/06. Behandlar du smala, trånga kanaler väljer du istället S1 Plus Small 15/06 och för större

kanaler S1 Plus Large 40/04.

S1-systemet innehåller även sterilförpackade pappersspetsar och storleksanpassade gutta-perkaspetsar till filarna S1 Plus Standard och S1 Plus Large. S1 - ett komplett, kompakt system.



S1 Plus Standard 25/06



S1 Plus Small 15/06

Där S1 Plus Standard 25/06 inte når ned till arbetslängd.



S1 Plus Large 40/04

I större kanaler där en K-fil 20 lätt når ned till arbetslängd.

MOVEMENT BY SWEDEN

The S1 System - reciprocating, smooth and flexible. Like a dance.

PRODUKTÖVERSIKT

REF	Produkt	Antal
6542471	S1-E Vinkelstycke för elmotor (40,000 rpm)	Kit
6574136	S1-A Vinkelstycke för luftmotor (20,000 rpm)	Kit
OP0007	S1-E Plus Start Up Set 2.0*	Set
OP0008	S1-A Plus Start Up Set 2.0*	Set
6583566	S1 Apex Clip dia. 2.0 mm	1 st/fp
S1P01BS	S1 Plus Treatment Pack	6 st/fp
S1P252506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 25 mm	6 st/fp
S1P312506BS	S1 Plus Standard 25/06 - 31 mm	6 st/fp
S1P251506BS	S1 Plus Small 15/06 - 25 mm	6 st/fp
S1P311506BS	S1 Plus Small 15/06 - 31 mm	6 st/fp
S1P254004BS	S1 Plus Large 40/04 - 25 mm	6 st/fp
S1P314004BS	S1 Plus Large 40/04 - 31 mm	6 st/fp
3521010BS	K-File 10 STERILE - 21 mm	30 st/fp
3525010BS	K-File 10 STERILE - 25 mm	30 st/fp
3521015BS	K-File 15 STERILE - 21 mm	30 st/fp
3525015BS	K-File 15 STERILE - 25 mm	30 st/fp
259-705	S1 Paper Points Standard	120 st/fp
258-708	S1 Paper Points Large	120 st/fp
159-605	S1 Gutta Percha Standard	60 st/fp
158-608	S1 Gutta Percha Large	60 st/fp
385S15001	S5 Apex Locator	Kit

*För mer information kontakta din lokala återförsäljare eller Sendoline.

Sendoline®

Box 7036, 187 11 Täby | Måttbandsvägen 12B, 187 66 Täby | Sverige

 contact@sendoline.com  www.sendoline.com

Allt innehåll i denna broschyr inklusive layout och bilder är skyddade av upphovsrätt.

Sendoline, S1, S5, S5 Rotary Files, S-Files/S-fil, inklusive S-symbolen och NiTi-S är varumärken och/eller bildmärken som tillhör Sendoline.

© 2019 Sendoline AB. Med ensamrätt.